

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09820**
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Venenstauer
einzel verpackt



MAßE				
Länge	Breite	Höhe	Durchmesser	Gewicht
450 mm	25 mm	-	-	-

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☐ Polypropylen (PP)	☐ Polyethylen (PE)	☐ PP-Vlies	☐ PP-Vlies mit PE-Beschichtung	☐ Papier	☒ Clip: ABS Band: latexfreies Elastikband	
Farbe	☒ Blau [B]	☐ Cedro [C]	☐ Dunkelblau [DB]	☒ Grün [G]	☐ Grün-Opak [GO]	☐ Lila [L]	☐ Hellblau [LB]
	☐ Lime [LIME]	☐ Mix [MIX] schwarz, cedro, lila, rosa, hellblau	☐ Orange [O]	☐ Pink [P]	☒ Rot [R]	☐ Rose [ROSE]	☐ Schwarz [SCH]
	☐ Violett [V]	☒ Weiß [W]	☐ Weinrot [WR]	☒ Gelb [Y]	☐ Silber	☐ Natur	☐ bordeaux
Eigenschaft	☐ zum einmaligen Gebrauch	☐ einschneidig	☐ 5-lagig	☐ fusselfrei	☐ 6-lagig	☒ elastisch	
Inhaltsstoffe	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% Wasser	☐ 70 % Isopropyl-Alkohol				
Bemerkung							

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☐ kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☐ saure Lebensmittel	☐ wässrige Lebensmittel	☐ fette Lebensmittel	☐ alkohol. Lebensmittel	☐ trockene Lebensmittel	☒ nicht für Lebensmittel geeignet	

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09820**
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Venenstauer
einzel verpackt



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines	
Material	Karton/PVC
Stück pro Unterpackung	1
GTIN Unterpackung Blau [B]	4044941016245
GTIN Unterpackung Cedro [C]	-
GTIN Unterpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Unterpackung Grün [G]	4044941010359
GTIN Unterpackung Grün-Opak [GO]	-
GTIN Unterpackung Lila [L]	-
GTIN Unterpackung Hellblau [LB]	-
GTIN Unterpackung Lime [LIME]	-
GTIN Unterpackung Mix [MIX]	-
GTIN Unterpackung Orange [O]	4044941727196
GTIN Unterpackung Pink [P]	-
GTIN Unterpackung Rot [R]	4044941010335
GTIN Unterpackung Rose [ROSE]	-
GTIN Unterpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Unterpackung Violett [V]	-
GTIN Unterpackung Weiß [W]	-
GTIN Unterpackung Weinrot [WR]	-
GTIN Unterpackung Gelb [Y]	4044941016269
GTIN Unterpackung Silber	-
GTIN Unterpackung Natur	-
GTIN Unterpackung	-
Maße & Größe	
Länge	42 mm
Breite	40 mm
Höhe	85 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	36 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines	
Material	Karton
Unterpackungen je Umverpackung	400
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941016252
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	4044941010366
GTIN Umverpackung Grün-Opak [GO]	-
GTIN Umverpackung Lila [L]	-
GTIN Umverpackung Hellblau [LB]	-
GTIN Umverpackung Lime [LIME]	-
GTIN Umverpackung Mix [MIX]	-
GTIN Umverpackung Orange [O]	4044941727202
GTIN Umverpackung Pink [P]	-
GTIN Umverpackung Rot [R]	4044941010342
GTIN Umverpackung Rose [ROSE]	-
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Umverpackung Violett [V]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-
GTIN Umverpackung Weinrot [WR]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	4044941016276
GTIN Umverpackung Silber	-
GTIN Umverpackung Natur	-
GTIN Umverpackung	-
Maße & Größe	
Länge	453 mm
Breite	423 mm
Höhe	380 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	14.900 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	4
Lagen pro Palette	4
Palettenhöhe	167 cm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	263 kg

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09820**
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Venenstauer
einzelnd verpackt



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Nutzung und Überprüfung	1. Öffnen Sie die Packung und nehmen Sie die Staubinde heraus. Falten Sie sie so auseinander, dass die Vorderseite des Verschlusses nach oben zeigt. Legen Sie das elastische Band um den zu stauenden Bereich oder um den Ellbogenbereich. 2. Stecken Sie den Verschluss in das Einsteckteil und befestigen Sie ihn. 3. Ziehen Sie das elastische Band, bis es straff genug sitzt. 4. Zum Lösen der Staubinde drücken Sie zuerst auf die Vorderseite des Verschlusses, um das Band zu lösen. Dann drücken Sie auf den Knopf auf der Vorderseite. Das Einsteckteil gibt automatisch den Verschluss frei.
Reinigungshinweise	Bei geringer Verschmutzung ist Handwäsche bei bis zu 60 °C mit haushaltsüblichem Waschmittel möglich. Eine Desinfektion mit flüssigem Desinfektionsmittel wird empfohlen. Nicht für physikalische Desinfektionsverfahren geeignet.
Entsorgung	Das Produkt gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in der Toilette entsorgen.
Warnhinweise / Sicherheitsinformationen	Nur durch geschultes medizinisches Personal verwenden. Unsachgemäße Anwendung kann zu Verletzungen oder Komplikationen führen.

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2025-00
 Datum 09. 05.2025

Änderungen & Irrtümer vorbehalten