

MED-COMFORT
Kältebeutel
Kühlung durch chemische
Reaktion
Artikelnr.: 09135



Maße: 15 x 17 cm

Beutel: PE

Verwendung: zur einmaligen Anwendung. Direkten Hautkontakt vermeiden, nicht unter 0 oder über 45°C lagern.

Die Kühlung entsteht durch chemische Reaktion.

Dafür den Beutel kräftig mit beiden Händen zusammendrücken und den Innenbeutel zum Platzen bringen.
Hierzu empfiehlt es sich, den Beutel auf den Tisch zu legen und mit beiden übereinandergelegten Handflächen („wie bei einer Reanimation“) kurz festen Druck auf den innenliegenden Beutel auszuüben.

Qualitätssicherung: EN ISO 13485, Medizinprodukt Klasse IIa gem. Richtlinie 93/42/EWG, CE 0197, ISO 10993-10:2010

Verpackung: 40 Stück im Umkarton